

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA E LA SPEDIZIONE DEL CAMPIONE BUCCALE



Fase 1: COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI

Si raccomanda di compilare in ogni sua parte la documentazione relativa al campione:

- Modello di richiesta test correttamente compilato
- Consenso informato correttamente compilato



Fase 2: RACCOLTA DEL CAMPIONE

Per effettuare correttamente la procedura di raccolta delle cellule buccali, durante l'ora precedente al prelievo è importante evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, lavare i denti.

Aprire la confezione.

Estrarre il tampone dalla provetta. Attenzione! Non toccare la parte in cotone del tampone per evitare la contaminazione! È consigliabile strofinare il tampone su entrambe le guance e sulla mucosa interna delle labbra. Ripetere l'azione più volte accertandosi di avere eseguito correttamente la procedura. Per una raccolta standard è necessario strofinare per almeno 60 secondi. Inserire nuovamente il tampone nella provetta. Chiudere accuratamente il tampone fino a sentirne lo scatto definitivo, che preserverà il campione durante la spedizione.



Fase 3: ETICHETTATURA DEL CAMPIONE

Si raccomanda di apporre sul campione l'etichetta compilata con le seguenti informazioni:

- Nome e cognome del paziente
- Data di nascita del paziente
- Data e ora del prelievo



Fase 4: PREPARAZIONE DELLA BOX

Si raccomanda di alloggiare il campione all'interno della box in dotazione per la spedizione.

- Inserire il campione nella busta BIO HAZARD in dotazione (se presente)
- Non refrigerare il campione. Il campione deve essere conservato a temperatura ambiente (15-25°C) fino al momento della spedizione (salvo note speciali)
- Chiudere con cura la scatola

NOTE SPECIALI: Il campione deve essere conservato a temperatura ambiente se la spedizione avviene entro 24 ore dal prelievo, in caso opposto conservare in frigorifero fino al momento della consegna al corriere



Fase 5: SPEDIZIONE

La spedizione del campione buccale avviene in contemporanea con il campione ematico, si prega di seguire scrupolosamente la procedura riportata sull'altra facciata di queste istruzioni.